

Attainment's



Uživatelský manuál





Obsah

Rychý start	3
Stahování předem připravených stránek	6
Úprava stránek	7
Možnosti stránky	8
Titulek stránky	10
Titulek stránky	10
Ikona stránky	10
Zvuková narážka	11
Vytvoření komunikační buňky	12
Barva pozadí/okrajů	12
Text na tlačítku	12
Přidat obrázek	14
Úpravy obrázku..	15
Zvuková narážka	15
Akce	16
Základní slovní zásoba	18
Nabídka Přejít k	19
Komunikační stránka Express	20
Komunikační stránka se scénou	22
Přehrávač	23
Nastavení	24
Tlačítka	24
Nastavení přehrávače	25
Skenování	26
Nastavení Express stránky	27
Video tlačítka	27
Správa	27
Experimentální funkce	27
Obchod	28
Správa komunikačních knih	29
Vytváření více knih	29
Sdílení přes WiFi	30
Export do PDF	30
Vytváření zálohy	31
Šablony	32
Vytvoření šablony..	32
Sdílení přes Email	33
Sdílení pomocí Online galerie šablon	34
Soukromá galerie	34
Veřejná galerie	35
Poděkování	37
Kontaktujte nás	37



Rychlý start

Při prvním otevření aplikace GoTalk NOW uvidíte úvodní obrazovku se sedmi možnostmi:

Stiskněte tlačítko **GoTalk NOW** pro otevření GoTalk NOW přenosu, který vám umožní sdílet komunikační knihy pomocí WiFi.

- Stiskněte Přehrávač pro otevření komunikační knihy. Kniha bude prázdná, dokud v ní nevytvoříte komunikační stránky.

➔ **Poznámka:** Pro ukončení Přehrávače dejte 3 prsty na horní okraj obrazovky a projedte jimi plynule celou obrazovku směrem dolů, případně stiskněte a držte tlačítko Domů po dobu 8 sekund bez pohybu prstu (8 sekund je více než se zdá).



Home screen

- Stiskněte tlačítko **Úprava stránek** pro tvorbu nebo úpravy komunikačních stránek.
- Stiskněte tlačítko **Nastavení** pro výběr možností nastavení.
- Stiskněte tlačítko **Obchod pro nákupy doplňků aplikace (IN-APP)**.
- Stiskněte tlačítko **Nápověda pro otevření uživatelského manuálu**.
- Stiskněte titulek komunikační knihy na dolním okraji obrazovky k otevření okna Komunikační knihy.

Nyní jste připraveni proměnit svůj iPad v komunikační pomůcku. Pomocí několika kroků vytvoříte komunikační stránky, které pak můžete v iPadu používat.

1. Stiskněte tlačítko **Úprava stránek** na úvodní obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko **Možnosti stránky, jehož pomocí otevřete okno** pro nastavení stránky.
3. Vyberte a stiskněte počet tlačítek, které si přejete mít na komunikační stránce. Každé tlačítko pak bude fungovat jako komunikační buňka v Přehrávači.
4. Možnost **Zapnuto určuje, zda** bude komunikační stránka viditelná v Přehrávači. Pokud je vypnuta, komunikační stránka se v Přehrávači neobjeví.
5. Možnost **Express stránka určuje, zda** bude mít komunikační stránka standardní nebo Express styl. Komunikační kniha může obsahovat oba styly. Ve standardním stylu se akce přidružená ke komunikační buňce přehraje při stisku buňky. V Express stylu se komunikační buňky se sdělením (nahrávka nebo syntetický hlas) řadí do komunikačního řádku v horní části stránky.







Rychlý start

Do řádku lze postupně poslat více buněk (sdělení). Klepněte pak kamkoliv do komunikačního řádku a sdělení se přehrají jedno za druhým. Pomocí Express stylu můžete skládat jedinečná sdělení, ale pro některé uživatele může být poněkud složitější se s ním naučit pracovat.


6. Vyberte si tlačítko pro komunikační buňku a stiskněte ho – nyní můžete začít tvořit komunikační buňku.

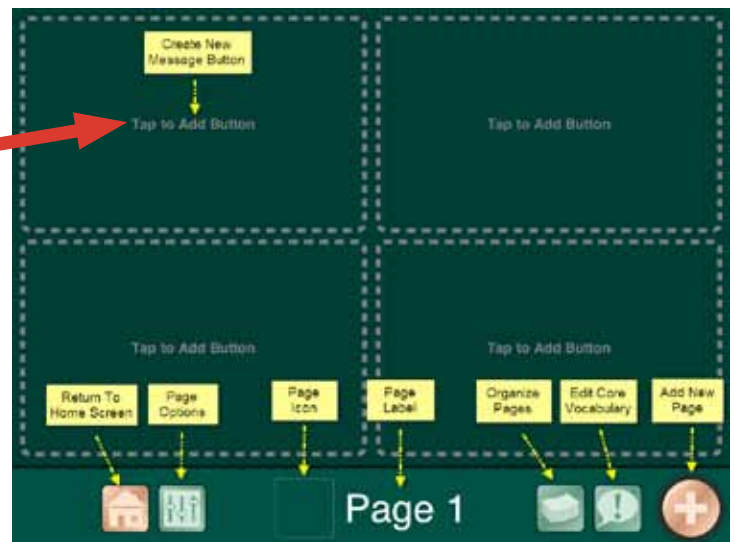

7. Pro úpravy vzhledu komunikační buňky stiskněte tlačítka s možnostmi **Pozadí**, **Okraje**, **Text** na tlačítku a **Přidat obrázek** na dolním okraji obrazovky a nastavte své volby. Pro uzavření okna klepněte kamkoliv na obrazovku. Pro uložení změn klepněte na **Hotovo**.

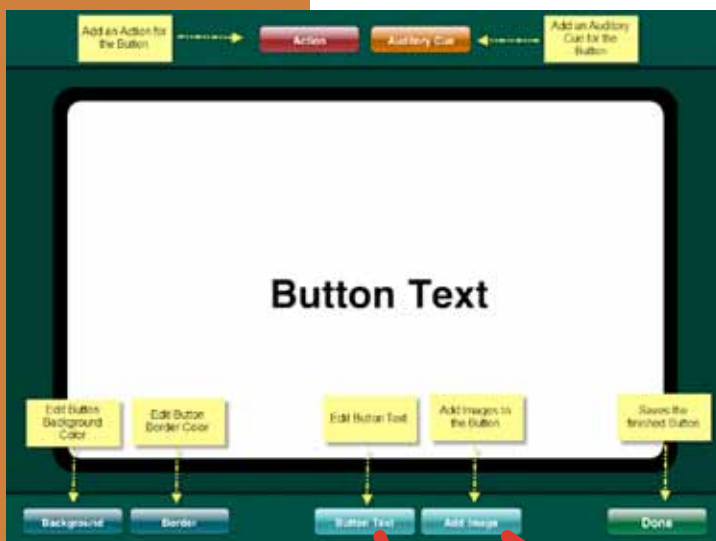

- **Pozadí:** Vyberte si barvu z nabídky nebo si vytvořte svou vlastní barvu.
- **Okraje:** Vyberte si barvu z nabídky nebo si vytvořte svou vlastní barvu.
- **Text na tlačítku:** Zadejte text a měňte jeho velikost, písmo a barvu. Po uzavření okna **Text** můžete textem na tlačítku pomocí prstů pohybovat, zvětšovat jej či zmenšovat.
- Vyberte si obrázek z GoTalk knihovny obrázků, pomocí internetového vyhledávání, z fotoaparátu nebo z knihovny fotografií. GoTalk NOW umožňuje použití více obrázků v jedné komunikační buňce. Pomocí prstů můžete pak obrázkem (obrázky) pohybovat a měnit jejich velikost. Můžete také stisknout a držet obrázek nebo na něj dvakrát klepnout - objeví se okno **Upravit obrázek**. Zde můžete vybrat možnosti Smazat obrázek, Vrátit na původní pozici, nebo Ohraničit.

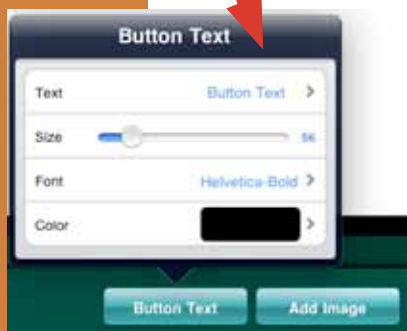




Rychlý start

➔ **Poznámka:** Možnost Text-to-Speech funguje teprve po zakoupení hlasu.

➔ **Poznámka:** Pro ukončení režimu úpravy stránek umístěte tři prsty na spodní okraj obrazovky a přejeďte jimi plynule nahoru nebo stiskněte tlačítko Domů.

8. Stiskněte oranžové podlouhlé tlačítko **Zvuková narážka** na horním okraji obrazovky pro otevření okna Zvuková narážka. Vyberte a stiskněte buď možnost Nahrávka nebo Text-to-Speech (syntetický hlas). Pokud užíváte zvukové narážky, ujistěte se, že jejich užívání je zapnuto v Nastavení. Zvuková narážka je krátké předběžné sdělení, které uživatele uvědomí o obsahu a akcích v komunikační buňce. Například když v přehrávači stisknete komunikační buňku se zvukovou narážkou, přehraje se nejprve narážka a okraje buňky se přitom zbarví do zelena. Pak stiskněte buňku znovu, okraje se zbarví do červena a aktivuje se akce přidružená buňce.

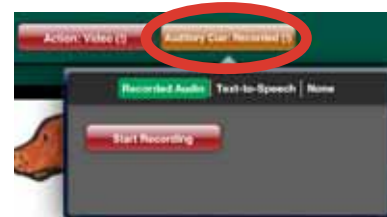

9. Stiskněte červené podlouhlé tlačítko **Akce** k otevření okna pro nastavení jednotlivých akcí v buňce. Vyberte žádanou akci – Nahrávka, Text-to-Speech (syntetický hlas), Přejít na stránku, Media Player nebo Video.


10. Stiskněte zlaté podlouhlé tlačítko **Po akci** pro otevření okna Po akci. Vyberte a stiskněte jednu z možností: Nedělat nic, Přejít na další stránku, Jít zpět, nebo Přejít na určitou stránku.

11. Až skončíte úpravy komunikační buňky, stiskněte tlačítko **Hotovo** na dolní části obrazovky a vraťte se na komunikační stránku.

12. Po vytvoření alespoň jedné komunikační stránky můžete aktivovat Přehrávač. Ukončete režim úpravy stránek. Klepněte na komunikační buňku, přehrajte zvukovou narážku (pokud je zadána) a pak přehrajte vlastní akci v buňce: přečtení sdělení, skok na jinou stránku, přehrání videa nebo hudby.


13. Na spodní části komunikační stránky je umístěna lišta s navigačními tlačítky. Pokud chcete nastavit, která z tlačítek se budou zobrazovat, zvolte možnost Nastavení na úvodní obrazovce.

- **Tlačítka navigace vlevo a vpravo:** levá a pravá šipka umožní procházet stránkami v daném pořadí.
- **Tlačítko Domů:** jeho pomocí přejdete k první komunikační stránce v knize.
- **Tlačítko Zpět:** jeho pomocí přejdete k naposledy zobrazené stránce.
- **Tlačítko Přejít k:** jeho pomocí otevřete seznam všech stránek v komunikační knize.
- **Tlačítko Základní slovní zásoba:** Jeho pomocí zadáte až 4 sdělení (nahrané nebo s využitím syntetického hlasu), která zůstanou stejná na všech stránkách dané komunikační knihy.

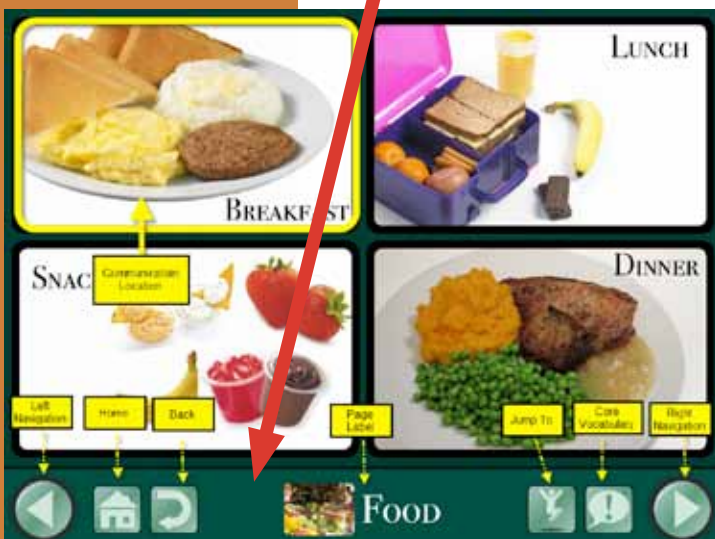




➔ **Poznámka:** Pro ukončení Přehrávače umístěte 3 prsty na horní okraj obrazovky a projed'te jimi plynule celou obrazovku směrem dolů, případně stiskněte a držte tlačítko Domů po dobu 8 sekund bez pohybu prstu.

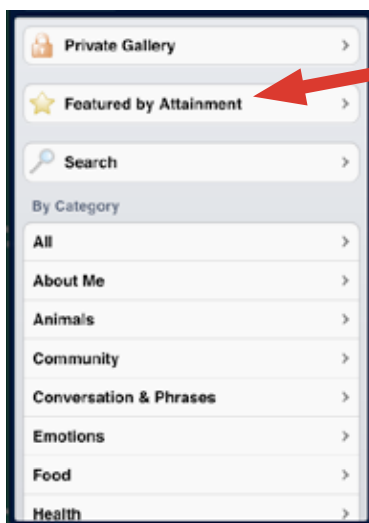
Stahování předem připravených stránek



Z naší Online galerie si můžete zdarma stáhnout interaktivní šablony GoTalk NOW. Tyto předem vytvořené stránky jsou výborné pro ilustraci, jak si vytvářet své vlastní personalizované stránky.

1. Stiskněte tlačítko **Úprava stránek**.
2. Stiskněte tlačítko **Stránky**. 
3. Stiskněte **Plus**. 
4. Stiskněte **Online galerie**.

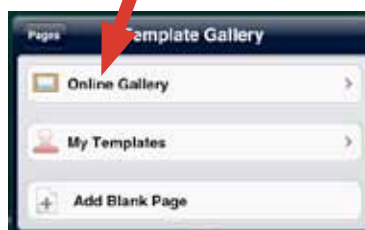


5. Vyberte a stiskněte kategorii **Vytvořeno společností Attainment** nebo jinou kategorií.
 6. Vyberte a stiskněte šablonu, kterou chcete stáhnout.
- 
7. Stiskněte **Stáhnout**.
 8. Po stažení šablony klepněte na **Přidat do komunikační knihy**.

Úprava stránek

Pro vytvoření komunikační stránky stiskněte tlačítko **Úprava stránek** na úvodní obrazovce. Uvidíte 8 tlačítek (ikon):



➔ **Poznámka:** Pro ukončení režimu úpravy stránek umístěte tři prsty na spodní okraj obrazovky a přejeďte jimi **plynule nahoru** nebo stiskněte tlačítko Domů.

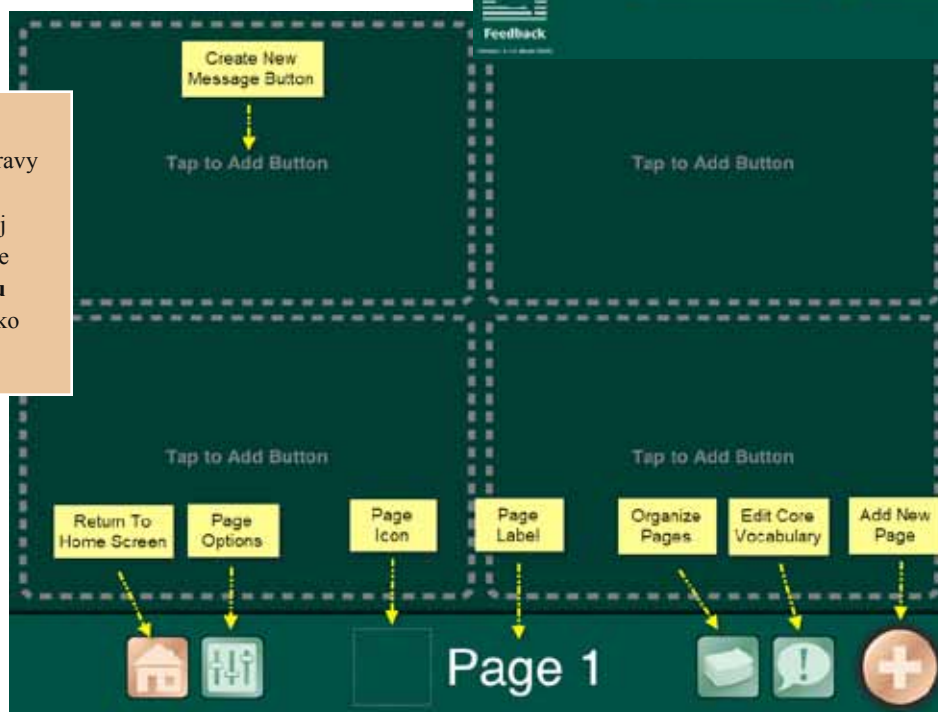


- **Klepněte pro přidání tlačítka** — Stiskem vytvoříte komunikační buňku.
- **Tlačítko domů** — Stiskem se vrátíte na úvodní obrazovku.
- **Možnosti stránky** — Stiskem nastavíte rozvržení komunikační stránky.
- **Ikona stránky** — Vyberte obrázek pro komunikační stránku.
- **Titulek stránky** — Vytvořte titulek pro vaši stránku
- **Stránky** — Otevřete seznam všech komunikačních stránek ve vaší knize.
- **Základní slovní zásoba** — Přidejte až 4 sdělení (nahrané nebo s využitím syntetického hlasu), která zůstanou stejná na všech stránkách dané komunikační knihy.
- **Přidat novou stránku** — Otevřete galerii šablon, kde se můžete vybrat šablonu nebo přidat prázdnou stránku.

Možnosti stránky

V okně **Možnosti stránky** je 5 variant nastavení:

1. **Pozadí** — Vyberte z hotových barev nebo si vytvořte vlastní barvu pozadí pro komunikační buňku.

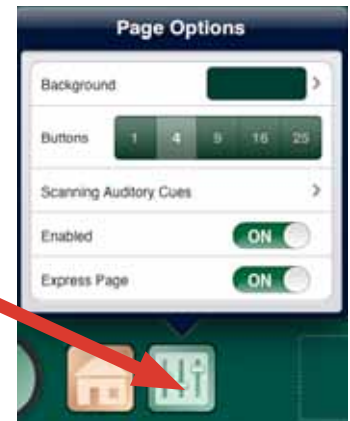

➔ **Poznámka:** Stiskněte tlačítko **Možnosti stránky** v horním levém rohu a vraťte se do okna **Možnosti stránky**.


Vyberte barvu ve štítku **Barvy** nebo klepněte na štítek **Paleta**.

2. **Tlačítka** — Vyberte počet tlačítek pro komunikační stránku. Můžete si vybrat z pěti rozvržení stránky: 1, 4, 9, 16 nebo 25 tlačítek.

➔ **Poznámka:** Pokud je vybráno jedno tlačítko, objeví se možnost **Tlačítko pro automatickou aktivaci**. Je-li tato možnost zapnuta, komunikační tlačítko se automaticky aktivuje při otevření dané komunikační stránky.



3. **Narážky pro skenování** —Určí zvukové nářky pro řádky/sloupce, pokud je aktivována možnost skenování v řádcích nebo sloupcích (pro uživatele s těžkým tělesným postižením). Můžete přidat zvukovou nářku ke každé řádce i každému sloupci.

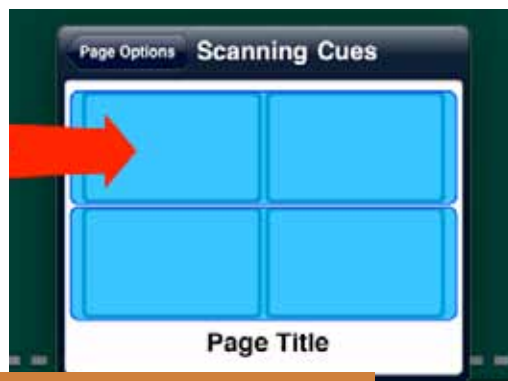

Zvukové nářky pro řádky



Zvukové nářky pro sloupce

- Vyberte a stiskněte řádku nebo sloupec pro vytvoření zvukové nářky. Objeví se pole s třemi možnostmi: **Nahrávka**, **Text-to-Speech** nebo **Nic**. Poznámka: Zvukové nářky pro řádky a sloupce se přehrají, pouze pokud je zapnuta možnost **Automatického skenování** v Nastavení. Pro pořízení zvukové nahrávky stiskněte **Začít nahrávání**, mluve a pak stiskněte **Konec nahrávání**.
 - Pro použití Text-to-Speech (syntetický hlas), musíte zakoupit hlas za \$0.99. Ten pak můžete užívat kdekoliv v aplikaci GoTalk NOW. Napište svoje sdělení do pole pro text, stiskněte **Přehrát** a poslechněte si, jak sdělení zní.
4. **Zapnuto** —Tuto možnost zapněte, pokud se má komunikační stránka zobrazit v Přehrávači. Vypněte ji, pokud chcete komunikační stránku v Přehrávači skrýt. Tato možnost se dá využít u stránek vytvořených např. pro svátky či nepravidelné aktivity, jako je například návštěva lékaře apod.
5. **Express stránka** —Zapněte tuto možnost, pokud má stránka pracovat v **Express stylu**.


Titulek stránky

Titulek stránky se objeví na spodním okraji komunikační stránky. Možnosti titulku obsahují položky **Ikona**, **Zvuková narážka**, a **Nastavit písmo**. Titulek také identifikuje stránku v nabídce Přejít k.

Ve výchozím nastavení mají komunikační stránky titulek, který odpovídá pořadí, ve kterém byly vytvořeny. Například 9. stránka v komunikační knize má titulek Stránka 9. Klepněte na **Titulek stránky** pro změnu textu a přidání ikony (obrázku).



Default Page Label

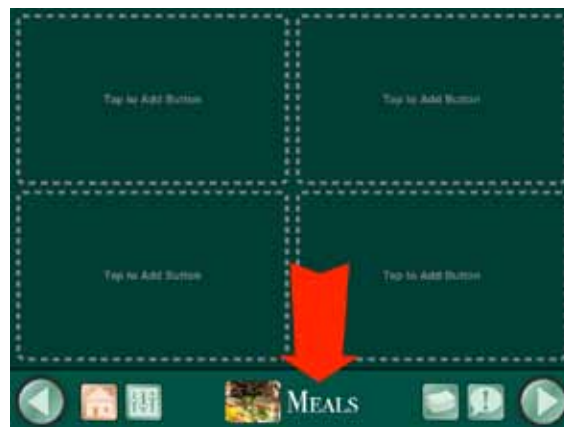

Edited Page Label



Titulek stránky

Titulek je název, který dáte komunikační stránce. Objeví se na spodním okraji stránky a v nabídce Přejít k. Pro změnu titulku napište do pole pro text jiný název. Potom můžete stisknout **Nastavit písmo** pro výběr velikosti a typu písma pro váš titulek.

Ikona stránky

Stiskněte tlačítko Ikona pro výběr obrázku ze čtyř možností: GoTalk knihovna obrázků, Internetové vyhledávání, Pořídít fotografii nebo Z knihovny fotografií.

1. Stiskněte tlačítko **GoTalk knihovna obrázků** a vybírejte mezi 4 000 obrázky. Zadejte klíčové slovo do vyhledávacího pole, abyste upřesnili hledanou položku.



2. Stiskněte tlačítko **Internetové vyhledávání** a otevřete Bing obrázky. Do pole pro vyhledávání zadejte slovo, prohlédněte si zobrazené výsledky a klepněte na obrázek, který chcete přidat k titulku stránky.




➔ **Poznámka:** Nutné je fungující internetové připojení.

3. Pořídíte fotografií pomocí fotoaparátu v iPadu. Stiskněte tlačítko Pořídít fotografii, otevře se fotoaparát.

➔ **Poznámka:** iPad 1 nemá fotoaparát.




Předmět či osobu vyfotografujte stiskem ikony kamery na spodním okraji obrazovky.

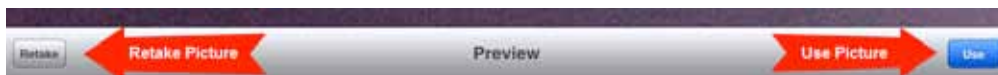

4. Stiskněte **Z knihovny fotografií** a vyberte fotografii uloženou v iPadu.

Zvuková narážka pro stránku

Pro pořízení nahrávky stiskněte tlačítko **Začít nahrávání**, mluvejte a pak stiskněte **Konec nahrávání**.

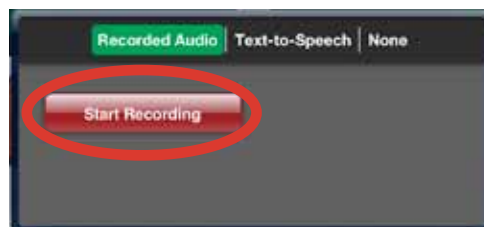

Pokud chcete užít Text-to-Speech (syntetický hlas), musíte si ho zakoupit za \$0.99. Můžete ho pak použít kdekoliv v aplikaci GoTalk NOW. Pište do textového pole a pak stiskněte tlačítko Přehrát, abyste slyšeli, jak bude sdělení znít.



➔ **Poznámka:** Pokud si jednou zakoupíte některý z hlasů, můžete ho použít kdekoliv v aplikaci GoTalk NOW.

Vytvoření komunikační buňky

Stiskem tlačítka s popisem Klepněte pro přidání tlačítka vytvoříte komunikační buňku.



Barva pozadí/okrajů

Pokud chcete měnit barvy, vyberte a stiskněte tlačítko **Pozadí** nebo **Okraje**. Jsou dvě cesty, jak barvu měnit.



Vyberte barvu v tabulce **Barvy**.



Stiskněte a táhněte terčík přes žádanou barvu v tabulce **Paleta**.

Text na tlačítku


Stiskněte **Text na tlačítku** nebo dvakrát klepněte na aktuální text – otevře se tabulka Text na tlačítku. Objeví se 4 možnosti: Text, Velikost, Písmo, a Barva.






Stiskněte tlačítko **Text** pro napsání slova nebo věty do komunikační buňky. Stiskněte tlačítko **Hotovo** na klávesnici nebo tlačítko **Text na tlačítku** a vrátíte se do tabulky.

Změňte **Velikost** textu pomocí táhla, případně text prsty chytněte a roztáhněte ho či zmenšete.

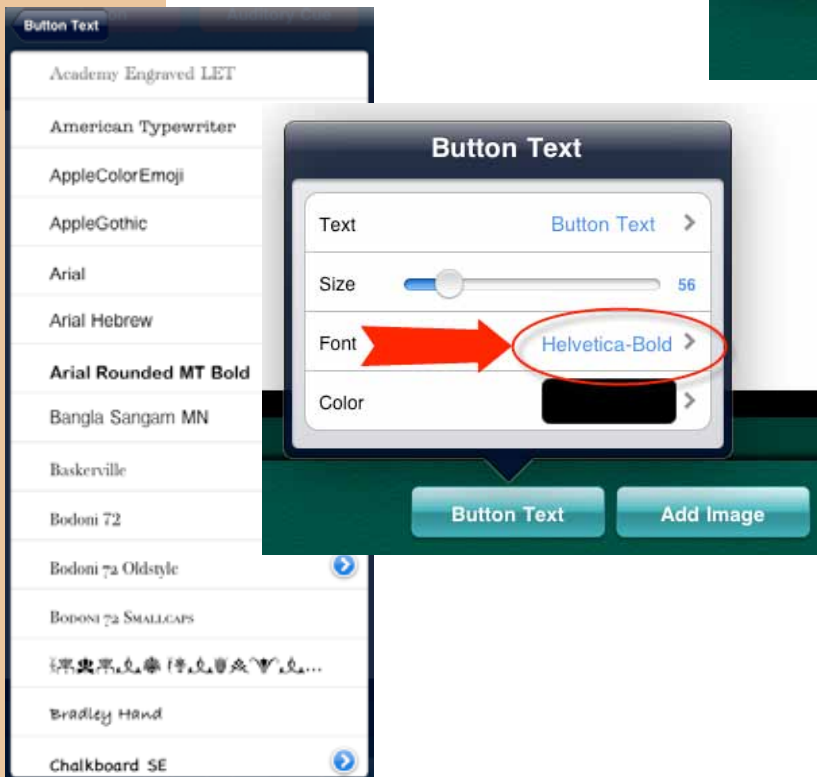


Pro změnu písma stiskněte tlačítko **Písmo**, vyberte nový typ písma a stiskněte **Text** na tlačítku pro návrat do tabulky.

Stiskněte tlačítko **Barva** pro změnu barvy textu. Jsou dvě cesty, jak vybrat barvu. Vyberte barvu v tabulce **Barvy**.

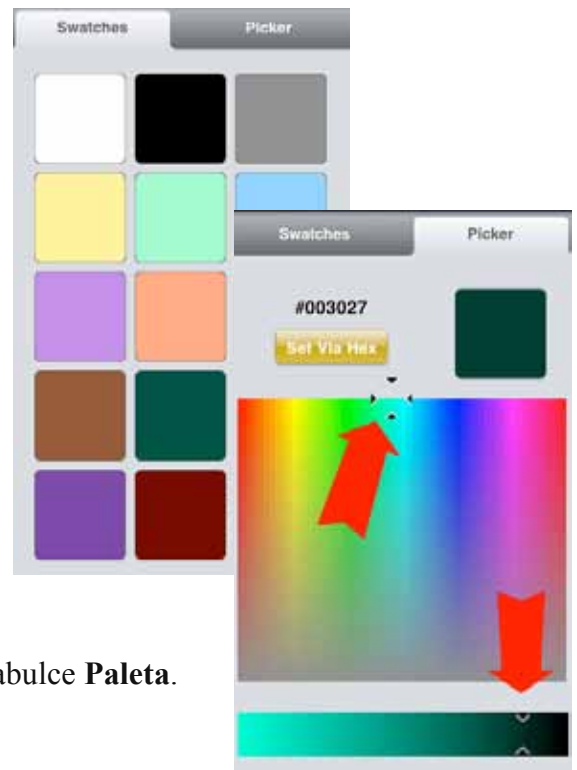

Stiskněte a táhněte terčík přes žádanou barvu v tabulce **Paleta**.

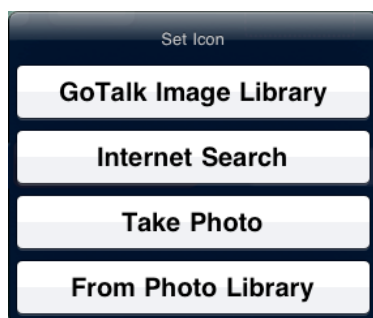

Přidat obrázek

Obrázek můžete vybrat ze čtyř zdrojů: GoTalk knihovna obrázků, Internetové vyhledávání, Pořídit fotografii nebo Z knihovny fotografií.

1. Stiskněte tlačítko **GoTalk knihovna obrázků** a vybírejte mezi 4 000 obrázky. Zadejte klíčové slovo do vyhledávacího pole, abyste upřesnili hledanou položku.



2. Stiskněte tlačítko **Internetové vyhledávání** a otevřete Bing obrázky. Do pole pro vyhledávání zadejte slovo, prohlédněte si zobrazené výsledky a klepněte na obrázek, který chcete přidat na titulek stránky.


➔ **Poznámka:** Nutné je fungující internetové připojení.

3. Poříďte fotografii pomocí fotoaparátu v iPadu. Stiskněte tlačítko **Pořídit fotografii**, otevře se fotoaparát. Předmět či osobu vyfotografujte stiskem ikony kamery na spodním okraji obrazovky.


➔ **Poznámka:** iPad 1 nemá fotoaparát.



Po prohlédnutí výsledku stiskněte tlačítko **Znovu** nebo **Použit**. Obrázek se vloží přímo jako titulek stránky a NEBUDE uložen mezi vaše ostatní fotografie v iPadu.

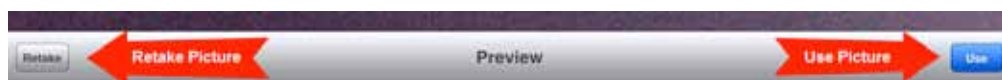


4. Stiskněte **Z knihovny fotografií** a vyberte fotografii uloženou v iPadu.

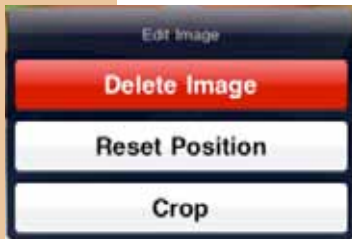

Úpravy obrázku

Stiskněte a přidržte obrázek nebo na něj kdekoli dvakrát klepněte. Budete moci obrázek smazat, vrátit ho do původního originálního umístění nebo ho ohraničit.

Pro změnu polohy obrázků přetáhněte prsty. Pro změnu velikosti obrázků prsty roztáhněte nebo zmenšete.

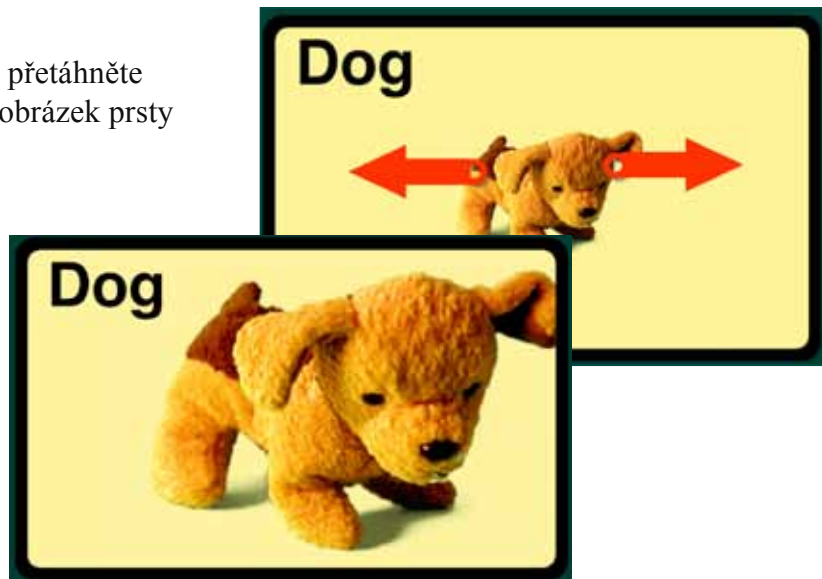


Pro otočení obrázku dejte dva prsty na protilehlé strany obrázku a přetočte ho.



Zvuková narážka

Stiskněte oranžové podlouhlé tlačítko Zvuková narážka a otevřete tabulku, kde si můžete vybrat z možností **Nahrávka** nebo syntetický hlas **Text-to-Speech**.

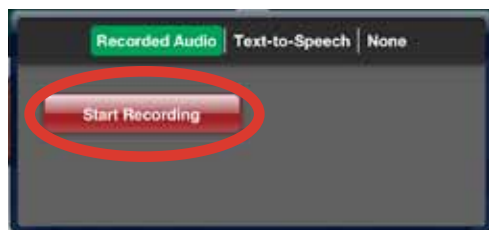

Pro pořízení nahrávky stiskněte tlačítko **Začít nahrávání**, mluvíte a pak stiskněte **Konec nahrávání**.

➔ **Poznámka:** Pokud si jednou zakoupíte některý z hlasů, můžete ho použít kdekoli v aplikaci GoTalk NOW.

Pokud chcete užít Text-to-Speech (syntetický hlas), musíte si ho zakoupit za \$0.99. Můžete ho pak použít kdekoli v aplikaci GoTalk NOW. Pište do textového pole a pak stiskněte tlačítko **Přehrát**, abyste slyšeli, jak bude sdělení znít.



Jsou čtyři způsoby, jak užívat zvukové narážky

1. **Skenování:** Zvuková narážka poskytne rychlý popis každé komunikační buňky během skenování. Tomu se říká “zvukové skenování.”
2. **Uvedení do nového slovníku:** Některá slova nebo pojmy se těžko ilustrují, například slova jako “prosím” a “chci.” Zvuková narážka pomůže uživateli porozumět významu nových nebo složitějších symbolů.
3. **Zrakové poruchy:** Zvuková narážka pomůže uživateli, který má zrakové postižení – pomocí této navigace se může pohybovat v komunikační knize.
4. **Předběžné sdělení:** Pokud zvuková narážka zní například “Ahoj Kubo, jak se dneska máš?” a Kuba odpoví “Díky, Jirko, prima, a jak se máš ty?” může Jirka druhým stiskem stejné komunikační buňky říci “Mám se dobře, díky.”

Akce


Stiskněte červené podlouhlé tlačítko **Akce** k otevření okna pro nastavení akcí. Vyberte žádanou akci – **Nahrávka**, **Text-to-Speech** (syntetický hlas), **Přejít na stránku**, **Media Player** nebo **Video**. **Poznámka:** Možnost Text-to-Speech funguje teprve po zakoupení hlasu. Pro pořízení nahrávky stiskněte tlačítko **Začít nahrávání**, mluvíte a pak stiskněte **Konec nahrávání**




➔ **Poznámka:** Pokud si jednou zakoupíte některý z hlasů, můžete ho použít kdekoli v aplikaci GoTalk NOW.

Pokud chcete užít Text-to-Speech (syntetický hlas), musíte si ho zakoupit za \$0.99. Můžete ho pak použít kdekoli v aplikaci GoTalk NOW. Pište do textového pole a pak stiskněte tlačítko **Přehrát**, abyste slyšeli, jak bude sdělení znít.



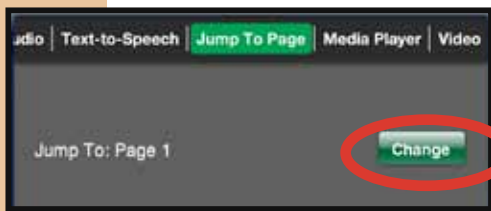

Přejít na stránku spojí komunikační buňku s určitou stránkou. Klepněte na tlačítko Změnit a můžete vybrat stránku, na kterou z této komunikační buňky “přeskočíte”.

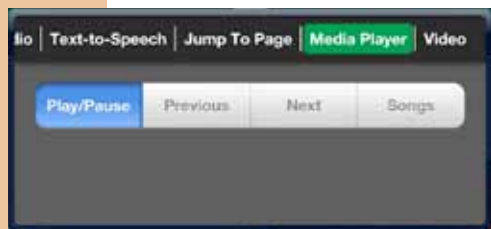


Media Player přehraje hudbu. Klepněte na vybranou skladbu, kterou máte již uloženu v iPadu.



Video přehraje vybrané video. Stiskněte tlačítko **Nastavit** a vyberte video, které již máte ve svém iPadu. Vyberte video mezi svými uloženými fotografiemi a videi.

➔ **Poznámka:** Pokud jste vytvořili komunikační buňku, můžete ji smazat, prohodit s jinou či zkopírovat. Stiskněte a držte danou buňku, dokud se neobjeví okno s těmito možnostmi.

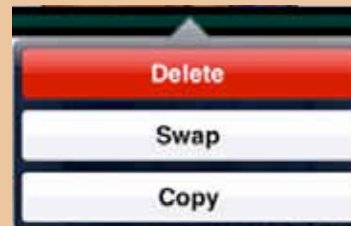

Pro odstranění buňky klepněte na **Smazat**.

Pro prohození s jinou buňkou klepněte na **Prohodit**, vyberte jinou buňku na stránce a klepněte na ni.


Pro zkopírování buňky na jinou komunikační stránku stiskněte **Kopírovat**, procházejte svými stránkami, dokud nenajdete buňku, kterou chcete pro kopii použít, a pak na ni klepněte. Zkopíruje se do ní původní buňka.

Prohozením a zkopírováním buňky přesunete všechny obrázky, text a akce.


Základní slovní zásoba




Tlačítko Základní slovní zásoba umožní přidat až čtyři sdělení (nahrávka nebo Text-to-Speech), která zůstanou stejná na všech stránkách komunikační knihy.

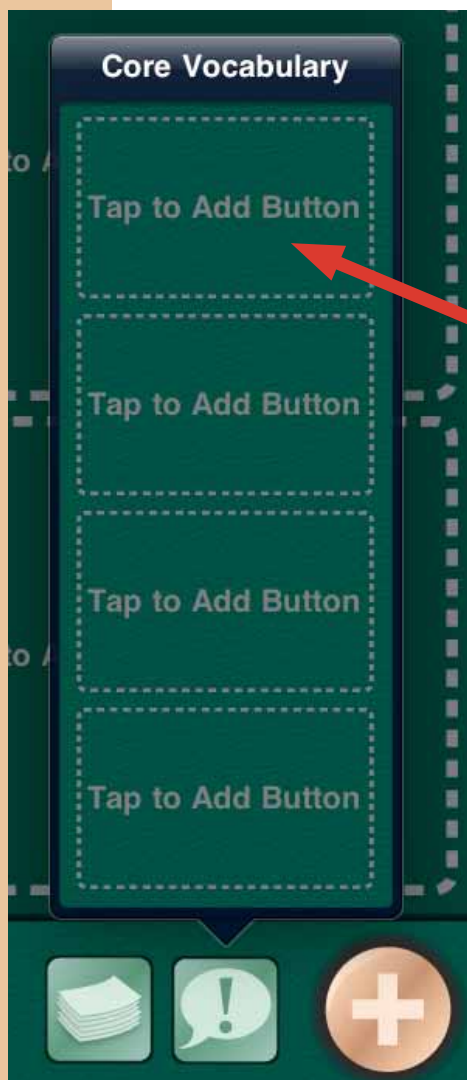


Stiskněte tlačítko **Klepněte pro přidání tlačítka** a učiňte stejné kroky jako při Vytváření komunikační buňky, str. 12–17.

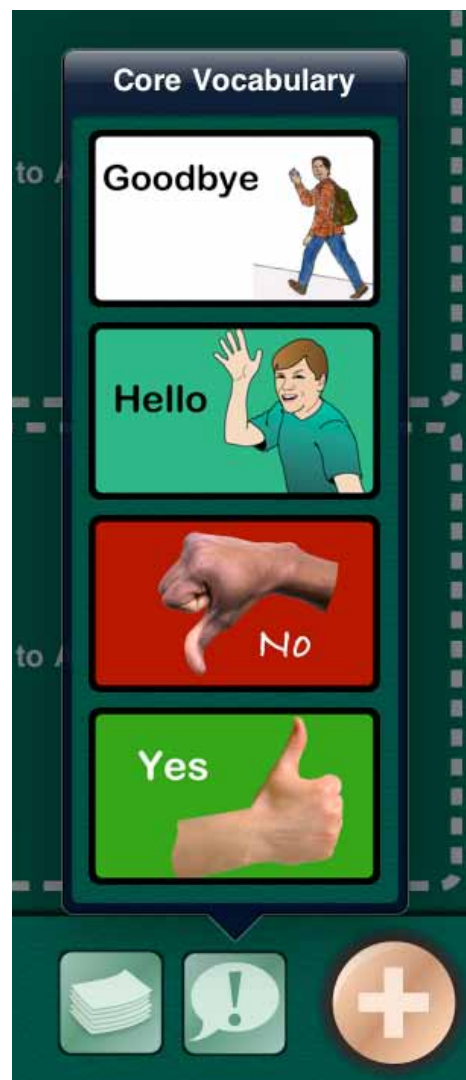

Nabídka Přejít k

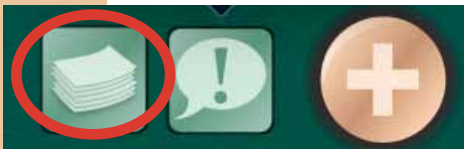


Nabídka **Přejít k** umožní jednoduchou navigaci z jedné stránky na druhou. Tímto tlačítkem otevřete seznam všech komunikačních stránek v knize. Vyberte a stiskněte **Titulek stránky**, na kterou chcete přejít.

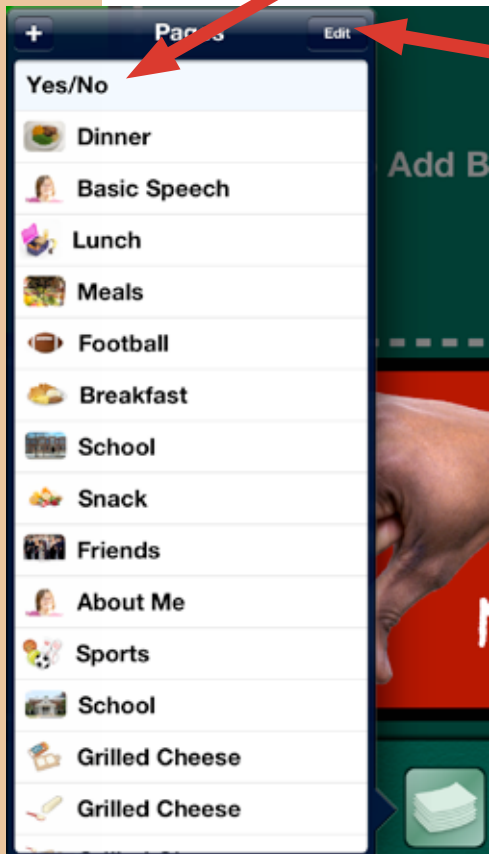

Pro změnu pořadí stránek nebo smazání stránky stiskněte tlačítko **Upravit** v pravém horním rohu tabulky. Objeví se malé červené kolečko vlevo u titulku každé stránky.

Pro smazání stránky kolečko stiskněte.


Pro změnu pořadí stránek stiskněte a držte obrázek napravo od titulku stránky v tabulce. Stránku pak přesuňte na žádané umístění.

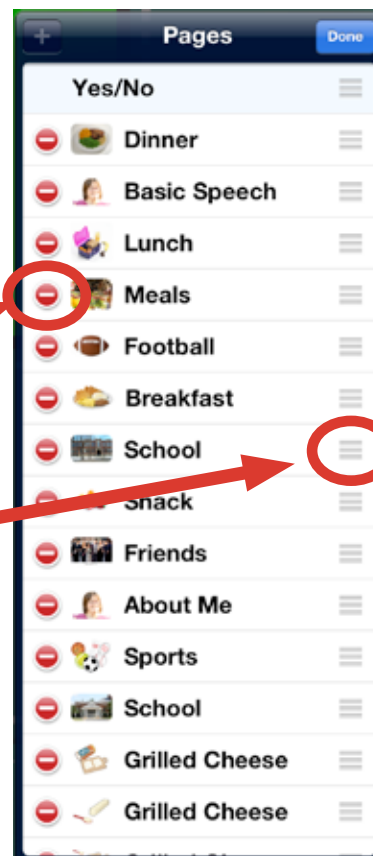

Komunikační stránka Express

Tato možnost vám dovolí řadit za sebou jednotlivé komunikační buňky a postupně je přehrát stiskem komunikačního proužku. Tento proužek se sděleními, která jste vybrali, se objeví v horní části jakékoliv komunikační stránky, která je nastavena na Express styl. Sdělení můžete pak v Přehrávači přehrát, znovu přehrát nebo změnit.

1. V nabídce Úprava stránek vyberte **Možnosti stránky**. Zde můžete změnit vybranou komunikační stránku na stránku s Express stylem.
 - Pokud není Express stránka zapnuta, akce v komunikační buňce se přehraje hned při stisku buňky.
 - Pokud je Express stránka zapnuta, komunikační buňky se sděleními (nahrávka nebo syntetický hlas) se řadí v komunikačním proužku v horní části Express stránky.
2. Aktivujte Přehrávač a vyberte komunikační stránku pro své sdělení ve stylu Express.
3. Stiskněte komunikační buňku – tím ji přidáte do proužku (pokud obsahuje zvukovou narážku, musíte ji stisknout dvakrát). Pak můžete stisknout jinou buňku. Buňky se sděleními se řadí v proužku za sebou a zůstanou tam, i když se přesouváte ze stránky na stránku.

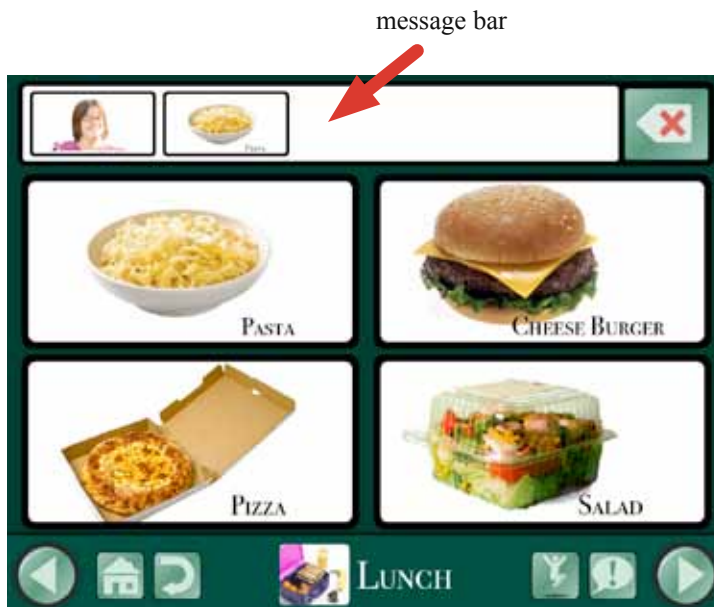

- V Express stránce lze použít pouze buňky s nahrávkou nebo syntetickým hlasem (Text-to-Speech), jiné buňky nelze vybrat (stisk zůstane bez odezvy).
- Pokud chcete poslední sdělení smazat, stiskněte tlačítko pro mazání. Pokud chcete smazat všechna sdělení, stiskněte a podržte tlačítko pro mazání.
- Pokud je zapnuto skenování, uvidíte dvě tlačítka pro mazání. Horním tlačítkem vymažete poslední sdělení, dolním tlačítkem smažete všechna sdělení.



4. Klepněte kamkoliv do komunikačního proužku a obsah buněk v proužku se přehraje. Při přehrávání se jednotlivé buňky v proužku zvýrazní zeleně. Buňky s nahrávkou se zvýrazní jednotlivě, buňky se syntetickým hlasem se zvýrazní jako skupina.


- Komunikační proužek se po přehráání vyprázdní, opětovné přehráání je však možné stiskem tlačítka, které se objeví na pravé straně proužku. Sdělení totiž zůstává stále v paměti, dokud není obsah proužku změněn nebo dokud nejsou sdělení smazána.



- K opětovnému přehráání sdělení stiskněte tlačítko vpravo.
- Aktuální sdělení se vždy objeví v horní části každé komunikační stránky, která je nastavena na Express styl. Sdělení lze tedy pak přehrát, znovu přehrát nebo změnit z jakékoliv stránky.
- Uvnitř stejné komunikační knížky můžete přepínat mezi standardním a Express stylem. Změnu provedete v nabídce **Možnosti stránky**.
- Pokud chcete vytvořit spojovací tlačítko, které zároveň odešle sdělení do komunikačního proužku, nastavte akci jako **Nahrávka** nebo **Text-to-Speech** a nastavte také možnost Po akci na **Přejít na určitou stránku**.

Komunikační stránka se scénou

Komunikační stránka se scénou je tvořena fotografií nebo obrázkem s neviditelnými komunikačními buňkami nebo oblastmi. Umístěte buňku na určitou oblast na fotografii, například na obličej spolužáka. Stiskněte buňku k přehrání akce. Užití známého obrázku na komunikační stránce může být ve srovnání s klasickou čtyřhrannou komunikační buňkou méně matoucí a pomůže uživatelům snadněji provést komunikační výběr.

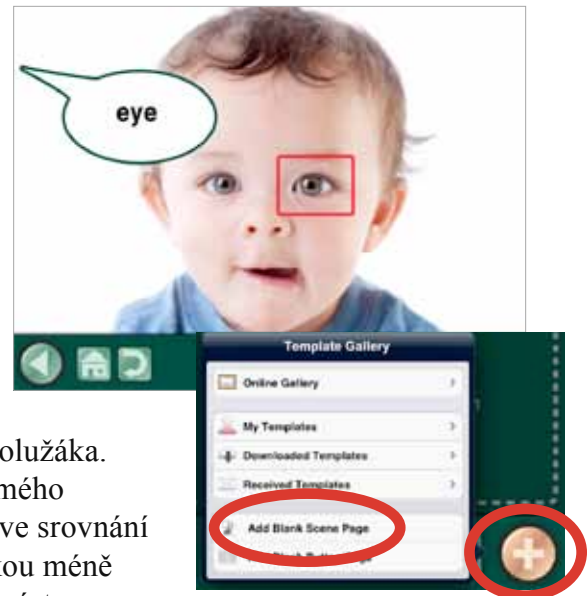

1. Stiskněte zlaté tlačítko **plus (+)**, které je umístěno úplně vpravo na navigační liště.
2. Vyberte možnost **Přidat prázdnou stránku pro scénu**.
3. Stiskněte **ikonu obrázku** nad zlatým tlačítkem plus a vyberte obrázek pro scénu.
4. Stiskněte **ikonu obrázku** znovu a vyberte možnost **Zamknout obrázek**, abyste zabránili nechtěnému posunu obrázku při umístění aktivní oblasti.

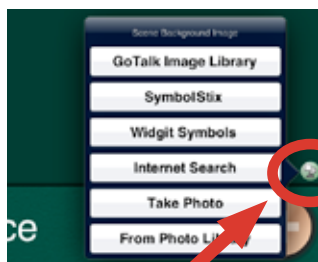


Image icon




5. Stiskněte **zelené tlačítko plus** (přidat oblast).
6. Najděte umístění pro aktivní komunikační oblast, potom přetáhněte na toto místo modrý čtverec (aktivní oblast). Upravte jeho velikost dle potřeby.
7. Stiskněte aktivní oblast (modrý čtverec) a přidejte akci. (Viz stránky 15–16 pro nastavení akcí a zvukové narážky.)
8. Pro přidání dalších aktivních oblastí zmáčkněte **zelené tlačítko plus** znovu.



➔ **Note:** There is a limit of 25 hotspots per page.

Přehrávač


Po vytvoření poslední komunikační stránky můžete aktivovat **Přehrávač**. Stiskněte komunikační buňku a můžete přehrávat zvukovou narážku (pokud jste ji nastavili) a tyto akce: přehrát sdělení, přejít na jinou stránku, přehrát video nebo přehrát hudbu. Na spodní části komunikační stránky vidíte vždy navigační lištu. Její podobu a zobrazení konkrétních tlačítek si můžete nastavit pomocí možnosti **Nastavení** na domovské stránce.

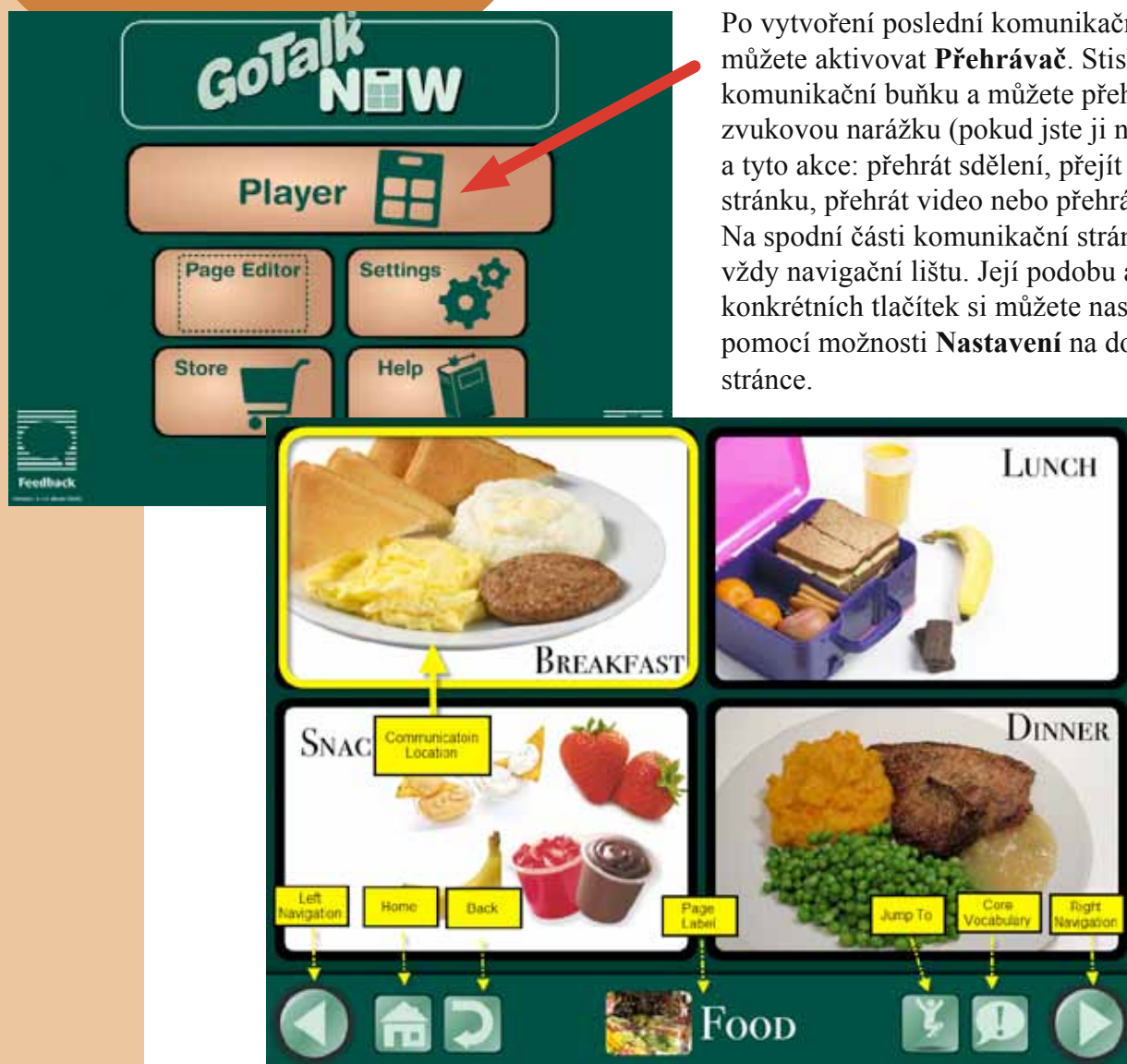

- **Tlačítka navigace vlevo a vpravo:** Pomocí levé a pravé šipky se lze přesouvat ze stránky na stránku v daném pořadí.
- **Tlačítko Domů:** Jeho pomocí lze přejít na první komunikační stránku v knize.
- **Tlačítko Zpět:** Jeho pomocí lze přejít k naposledy zobrazené stránce.
- **Tlačítko Přejít k:** Jeho stiskem se otevře seznam všech stránek v komunikační knize.
- **Tlačítko Základní slovní zásoba:** Jeho stisk umožní přidat až čtyři sdělení (nahrávka nebo syntetický hlas), která zůstanou stejná na všech stránkách komunikační knihy.

➔ **Poznámka:** Pro ukončení Přehrávače umístěte tři prsty na horní okraj obrazovky a projedte jimi plynule celou obrazovku směrem dolů, případně stiskněte a držte tlačítko Domů po dobu 8 sekund bez pohybu prstu (8 sekund je více, než se zdá).

Nastavení

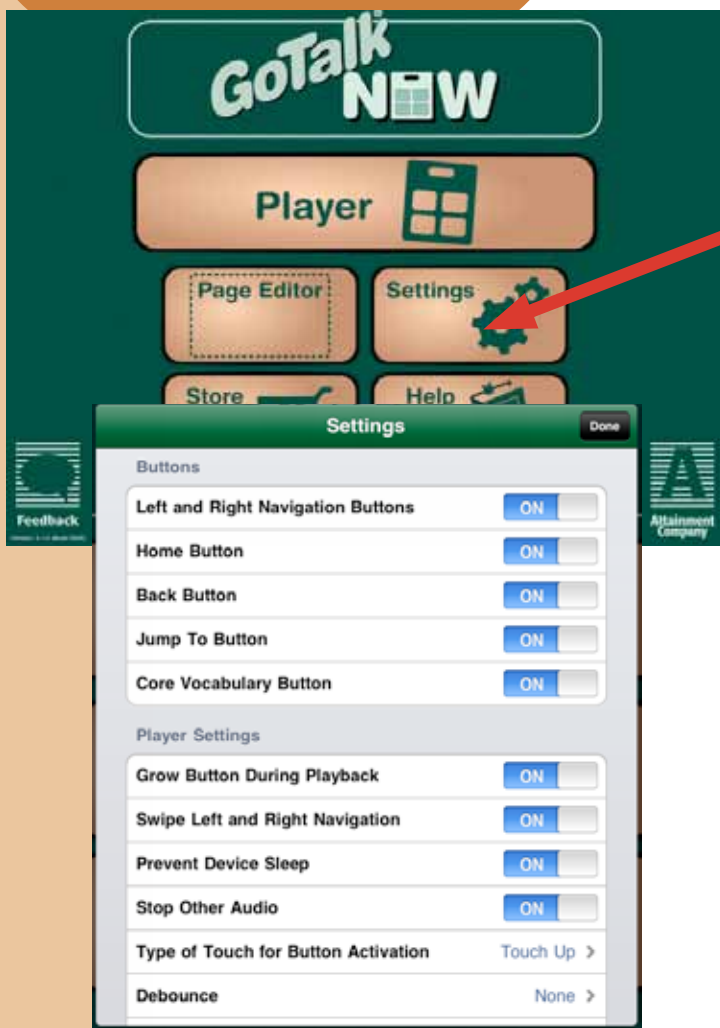

Pomocí tlačítka **Nastavení** lze nastavit způsob, jak je Přehrávač zobrazen a jak pracuje. Individuálně nastavit lze tyto možnosti:

- Tlačítka
- Nastavení Přehrávače
- Skenování
- Nastavení editoru (Úprava stránek)
- Nastavení Express stránky
- VoiceOver
- Video tlačítka
- Správa
- Experimentální funkce


Procházejte tabulkou **Nastavení nahoru a dolů a vyberte** si možnosti pro každou funkci. Až skončíte, stiskněte tlačítko Hotovo a vraťte se tak na domovskou stránku.

Tlačítka

Vyberte tlačítka, která se zobrazí v Přehrávači.



- **Tlačítka navigace vlevo a vpravo:** Pomocí levé a pravé šipky se lze přesouvat ze stránky na stránku v daném pořadí.
- **Tlačítko Domů:** Jeho pomocí lze přejít na první komunikační stránku v knize.
- **Tlačítko Zpět:** Jeho pomocí lze přejít k naposledy zobrazené stránce.
- **Tlačítko Přejít k:** Jeho stiskem se otevře seznam všech stránek v komunikační knize.
- **Tlačítko Základní slovní zásoba:** Jeho stisk umožní přidat až čtyři sdělení (nahrávka nebo syntetický hlas), která zůstanou stejná na všech stránkách komunikační knihy.

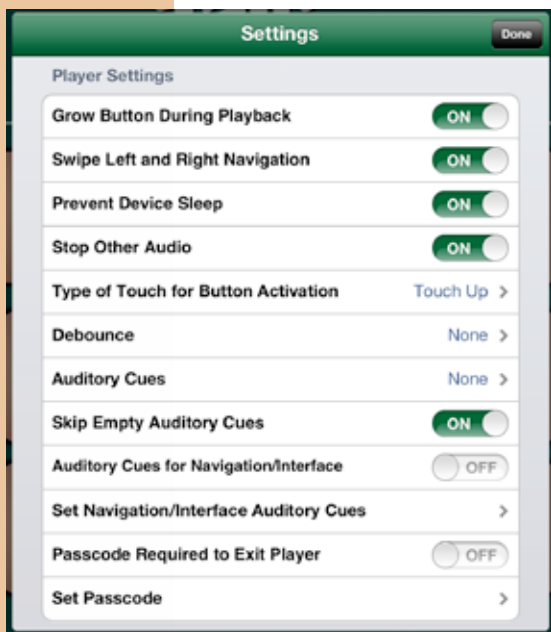

Nastavení Přehrávače

- **Zvětšit tlačítko během přehrávání:** Při stisku se komunikační buňka lehce zvětší, což umožní snadnější zrakovou identifikaci.
- **Levá a pravá navigace tažením:** Můžete se přesouvat ze stránky na stránku bez použití levé a pravé šipky. Přetáhněte jeden prst přes obrazovku směrem doleva nebo doprava a přesunete se na další stránku v pořadí.
- **Zamezit usnutí přístroje:** iPad zůstane zapnutý vždy, když budete pracovat v aplikaci GoTalk NOW.

- **Zastavit jiné audio:** Tímto nastavením zamezíte rušení aplikace GoTalk NOW hudbou nebo jiným audiem.

➔ **Poznámka:** Možnost Zastavit jiné audio byste měli vypnout, pouze když: (1) jsou zvukové narážky přiřazeny ke komunikační buňce s akcí jako Další nebo Přehrát/Pauza nebo když (2) chcete poslouchat hudbu nebo jiné audio, i když užíváte Go Talk NOW.

- **Typ dotyku pro aktivaci tlačítka:**

Uvolnění po stisku: Tlačítka jsou aktivována ve chvíli, kdy se prst po stisku uvolní z obrazovky.

Stisk: Tlačítka jsou aktivována ve chvíli stisku obrazovky.

- **Filtrování dotyků:** Toto nastavení chrání před náhodnou aktivací tlačítek, pokud nechtěně klepnete na stejné tlačítko vícekrát v krátkém intervalu po sobě.
- **Zvukové narážky:** Zvuková narážka je krátká nahrávka nebo sdělení pomocí syntetického hlasu (Text-to-Speech), které upozorní na akci v komunikační buňce. Například "Ahoj" je **zvuková narážka** a "Ahoj, jak se dneska máš?" je sdělení.

Normální zvuk přehraje zvukovou narážku i sdělení stejně silně.

Slabší zvuk přehraje zvukovou narážku slaběji než sdělení.

Možnost **Pro uživatele** přehraje zvukovou narážku do pravého kanálu a sdělení do levého.

➔ **Poznámka:** Nabídka **Pro uživatele** poskytuje možnost (s přídatným hardwarem) přehrát zvukovou narážku do sluchátek a sdělení přes reproduktory. Tímto způsobem slyší pak zvukové narážky jenom uživatel.

- **Přeskočit buňky bez zvukové narážky:** Toto nastavení je použitelné pouze tehdy, když jsou zapnuty zvukové narážky. Pokud užíváte skenování, měli byste tuto možnost vypnout.
- **Zvukové narážky pro navigaci/rozhraní:** Tlačítka na navigační liště přehrají při prvním stisku krátkou zvukovou narážku s popisem funkce tlačítka. Při druhém stisku dojde k provedení dané akce.

- **Nastavit zvukové narážky pro navigaci/rozhraní:** Každé tlačítko pro navigaci v aplikaci má výchozí zvukovou narážku. Pro každé tlačítko můžete vybrat Nahrávku, Text-To-Speech nebo Výchozí.
- **Vyžadovat heslo pro ukončení Přehrávače:** Tato možnost zabrání náhodnému opuštění Přehrávače. Při pokusu o opuštění Přehrávače je vyžadováno heslo složené ze čtyř číslic.
- **Nastavit heslo:** Můžete změnit heslo na jakoukoliv kombinaci čtyř číslic.

Skenování

V Přehrávači GoTalk NOW můžete užít skenování. Možnosti skenování nastavíte v sekci Skenování v nabídce Nastavení.

● Typ přístroje pro skenování:

- ➔ Attainment Switch app (pracuje s jiným iOS přístrojem, iPod touch, iPhone, nebo jiným iPadem)
- ➔ RJ Cooper's Bluetooth Switch interface
- ➔ Použít obrazovku jako spínač



- **Automatické skenování:** Když je automatické skenování zapnuto, Attainment Switch se chová jako jeden spínač. Zvýraznění se automaticky přesunuje z tlačítka na tlačítko (pro řádky/sloupce, viz možnost **Seskupení** níže). Když se zvýrazní tlačítko, které uživatel chce vybrat, stiskem spínače jej aktivuje. Pokud je automatické skenování vypnuto, Attainment Switch se přepne na dvojitý spínač a užívá postupné skenování po krocích. Levým spínačem se pak přesunuje zvýraznění z jednoho tlačítka na druhé (pro řádky/sloupce, viz možnost **Seskupení** níže) a pravým spínačem se tlačítko aktivuje.
- **Rychlost automatického skenování:** Vyberte časový úsek, po který zvýraznění zůstane na tlačítku při skenování pomocí jednoho spínače.
- **Seskupení:** Při skenování lze zvýraznit celý řádek/sloupec najednou. Když je pak nějaký řádek/sloupec vybrán, skenování postupně zvýrazňuje jednotlivá tlačítka v tomto řádku/sloupci.
- **Přepnout funkce:** Pokud je tato možnost vypnuta, levým spínačem se postupuje ve skenování a pravým spínačem se aktivuje buňka. Když je zapnuta, akce levého a pravého spínače se vymění.
- **Nastavení Attainment Switch:** Nastavte obrázky pro spínač, pokud užíváte aplikaci Attainment Switch app na jiném iOS přístroji.



Nastavení Express stránky

- **Vytvořit nové stránky jako Express:** Když je tato možnost zapnuta, každá nová stránka, kterou vytvoříte, bude v Express stylu. Když je vypnuta, vytvoří se standardní stránka.
- **Při čtení kombinovat položky TTS:** Když je tato možnost zapnuta, série sdělení Text-to-Speech se přečte jako věta. Když je vypnuta, série se přečte jako jednotlivá slova.
- **Kombinovat jako fragmenty slov:** Když je tato možnost zapnuta, série jednotlivých písmen se přečte dohromady a vytvoří slovo. Když je vypnuta, budou se číst názvy písmen (například “pé”).

Video tlačítka

- **Alternativní rozhraní:** Když přehráváte video, v alternativním rozhraní se zobrazí pouze tlačítka Odejít a Přehrát.
- **Část videa:** Tato možnost dovolí použít pouze vybranou část videa namísto celého.


Správa

- **Při příštím startu přejít k hlavnímu menu:** Pokud zapomenete heslo, můžete se dostat k nastavení GoTalk NOW pomocí nastavení pro iPad a zapnout tuto možnost. Při příštím otevření aplikace se pak otevře hlavní menu, ve kterém provedete potřebná nastavení. To se stane ale pouze jednou.

Experimentální funkce

- **URL tlačítka:** Tato možnost určuje, zda můžete na tlačítkách užít URL odkazy.
- **Skrýt všechny obrázky:** Všechna tlačítka pak obsahují pouze text, žádné obrázky.
- **Zobrazit dotyky při připojení externího monitoru:** Užitečné pro různá školení – když tuto možnost zapnete, účastníci uvidí na obrazovce, když zmáčknete obrazovku iPadu.

Obchod

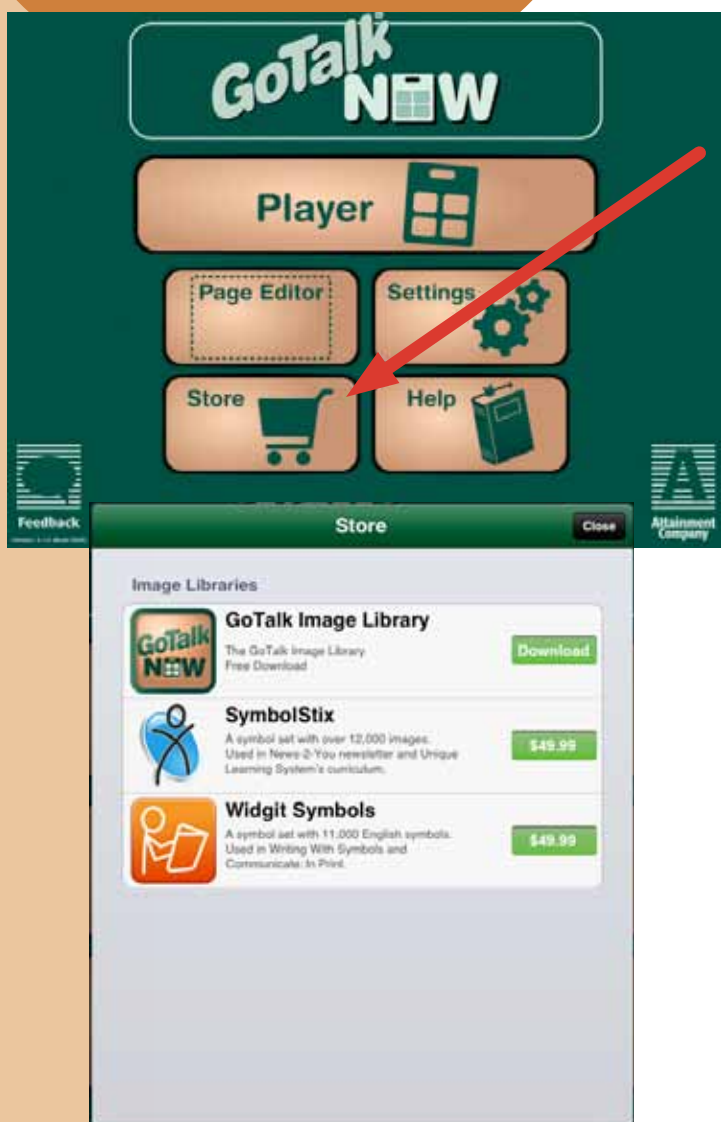

V obchodě můžete zakoupit různé sady symbolů, které jsou dostupné pro užití v GoTalk NOW. **GoTalk knihovna obrázků** je ke stažení zdarma; **SymbolStix** a **Widgit symboly** jsou dostupné za úplaty jako dodatek k aplikaci. Stiskněte štítek s cenou spojený se sadou symbolů a můžete uskutečnit nákup.

- **SymbolStix:** Tato sada symbolů má přes 12 000 obrázků a byla vytvořena společností N2Y pro užití v jejich internetovém týdeníku, News2You, a v jejich online kurikulu, Unique Learning Systems. Symboly nejsou přeloženy do češtiny. Typické aktivity a osoby jsou zobrazeny pomocí figurek z hůlek, které mají různé výrazy.
- **Widgit:** Tato sada symbolů má přes 11 000 obrázků, jde o jednoduše nakreslené a barevné symboly, které ilustrují jediný pojem srozumitelným způsobem. Pokrývají širokou řadu témat a jsou vhodné pro uživatele symbolů každého věku. Jsou přeloženy do češtiny (u nás známé v PC programu Symwriter).

Správa komunikačních knih



Komunikační kniha je složena z komunikačních stránek. Vytvářejte a skladujte knihy pro různé uživatele nebo více knih pro jednoho uživatele. Neexistují žádné limity počtu uživatelů stránek knihy nebo počtu knih, které vytvoříte.

Knihy můžete sdílet s jakýmkoliv iPadem, na kterém je nainstalován GoTalk NOW, nebo je zálohovat do jakéhokoliv Mac nebo PC počítače, kde je nainstalována pomocná aplikace (zdarma). Váš iPad a partnerský přístroj musí být pro sdílení a zálohování připojeny na stejnou WiFi síť.

Vytváření více knih

Pokud jsou dva iPady s GoTalk NOW ve stejné WiFi síti, lze mezi nimi sdílet komunikační knihy.

➔ **Poznámka:** Výchozí titulek je automaticky přidán k vaší první komunikační knize.



Stiskněte titulek a otevře se tabulka Komunikační knihy. V této tabulce je seznam všech knih, které jste vytvořili, a jsou zde také možnosti **Upravit**, **Přejmenovat** a **Vytvořit nové knihy**. Pokud je v seznamu více knih, zatržením je označena aktivní kniha. Stiskněte titulek jakékoliv knihy, pokud ji chcete aktivovat. Aktivní kniha se pak objeví v okně Úprava stránek a Přehrávač.



Sdílení pomocí WiFi

Pokud jsou dva iPady s GoTalk NOW ve stejné WiFi síti, lze mezi nimi sdílet komunikační knihy.

1. Stiskněte titulek aktivní komunikační knihy – tak otevřete tabulku Komunikační knihy. Vyberte knihu, kterou chcete sdílet, stisknutím jejího titulku.

Kniha, kterou chcete sdílet, by měla být aktivní a měla by být označena zatržením.

2. Stiskněte **GoTalk NOW** pro započetí vysílání.



3. Na partnerském iPadu otevřete stiskem titulek knihy tabulku Komunikační knihy.

4. Stiskněte možnost **Stáhnout z jiného GoTalk Now.**

5. Stiskněte titulek iPadu k otevření boxu k přetahování.

6. Pojmenujte knihu a stiskněte **Stáhnout.**



7. Počkejte, až se kniha přenese.

Proces je dokončen, pokud se sdílená kniha objeví v tabulce Komunikační knihy jako aktivní kniha.

Export do PDF

GoTalk NOW může exportovat PDF komunikační knihy. Otevřete tabulku Komunikační knihy.

Stiskněte knihu, kterou chcete exportovat, vedle ní se pak objeví tlačítko Export PDF. Potom toto tlačítko stiskněte a otevře se email s odkazem přístupu k pdf.

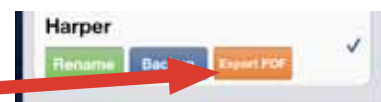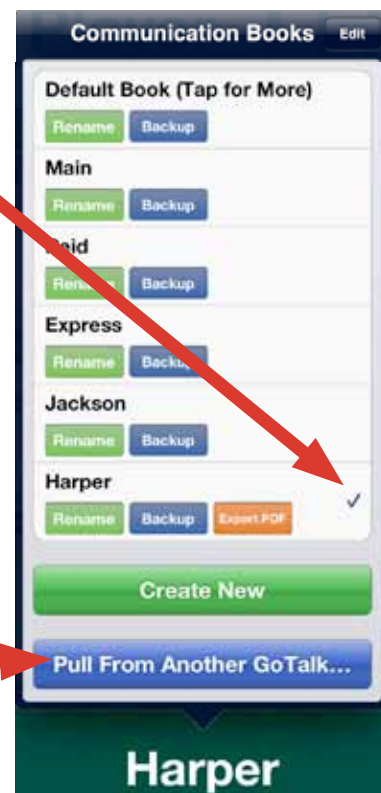

Vytváření zálohy

Komunikační knihy je možno zálohovat na počítač nebo je obnovit ze zálohy do iPadu pomocí aplikace **GoTalk NOW Backup Utility**, která je zdarma. Stáhněte si ji do svého počítače z www.AttainmentCompany.com nebo www.AttainmentFamily.com.

1. Dvakrát klikněte na ikonu GoTalk NOW Backup Utility na počítači.
2. Stiskněte na **Zálohovat** pro určitou knihu na iPadu.
3. Stiskněte **Na počítač**.
4. Stiskněte **Zálohovat na počítač**.
5. Stiskněte název místa pro zálohování, který se objeví v poli titulku.

➔ **Poznámka:** Pro vytvoření nového místa pro zálohování klepněte na tlačítko **Změnit** v aplikaci GoTalk NOW Backup Utility.


Velikost komunikační knihy určuje, jak dlouho bude vytvoření zálohy trvat. Větší knihy s více vlastnostmi se mohou zálohovat déle. Neopouštějte aplikaci GoTalk NOW, dokud se zálohování nedokončí. Po dokončení zálohy uvidíte nápis “Hotovo”.

Šablony




Šablona je soubor až pěti komunikačních stránek, které je možno sdílet mezi komunikačními knihami na iPadu nebo s jinými iPady, které užívají GoTalk NOW.


Vytvoření šablony

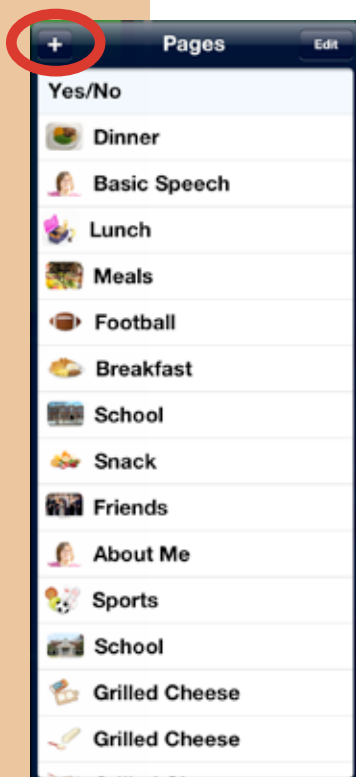

V nabídce **Úprava stránek** stiskněte tlačítko **Stránky** (umístěné napravo od titulku stránky) a otevřete tak tlačítko **Stránky**. Zmáčkněte znaménko plus (+) a otevřete tak okno **Galerie šablon**. Stiskněte **Moje šablony** a vytvořte novou šablonu nebo si prohlédněte dříve vytvořené šablony.

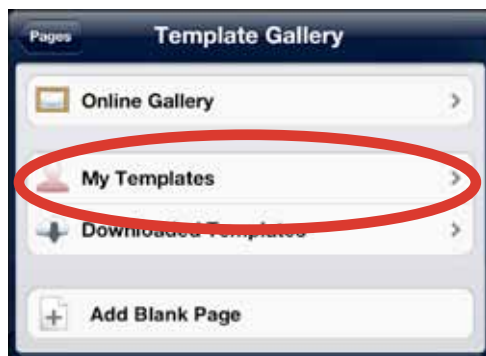

Pro vytvoření nové šablony klepněte na **Vytvořit novou šablonu**.

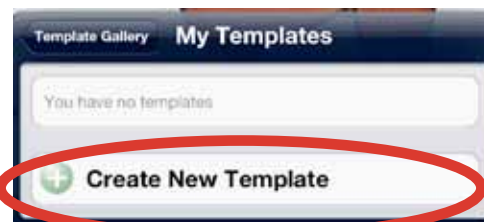


Tabulka Nová šablona se otevře s následujícími možnostmi:




- **Název:** Název vaší šablony.
- **Popis:** Informace v tomto oddíle vysvětlí jiným lidem, k čemu vaše šablona může sloužit, a obsahuje termíny, které je možno vyhledávat.
- **Autor:** Osoba, která vytvořila šablonu. Jméno autora se bude objevovat v seznamu **Moje šablony**.
- **Stránky:** Stiskněte **Nastavit a otevřete tak okno se seznamem všech stránek v knize**. Vyberte až 5 stránek – stiskem je přidáte do šablony. Poznámka: Pokud je stránka propojena s jinou stránkou, musíte přidat obě, aby všechny akce dobře fungovaly.

- **Foto obrazovky:** Vyberte stránku, která se zobrazí jako ikona šablony.

Pokud jste skončili, stiskněte **Vytvořit**.

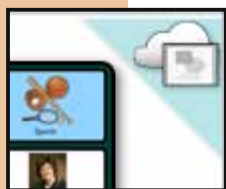


Pokud sdělíte šablonu v galerii, objeví se v pravém horním rohu jeden ze dvou obrázků. Obrázek obláčku se zarámovaným obrázkem znamená, že tato šablona je sdílána ve Veřejné galerii.

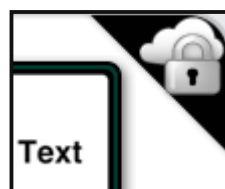


Obrázek obláčku se zámečkem znamená, že šablona je sdílána v Soukromé galerii.

Sdílení přes email

V nabídce Úprava stránek stiskněte tlačítko **Stránky** (umístěné vpravo od titulku stránky).

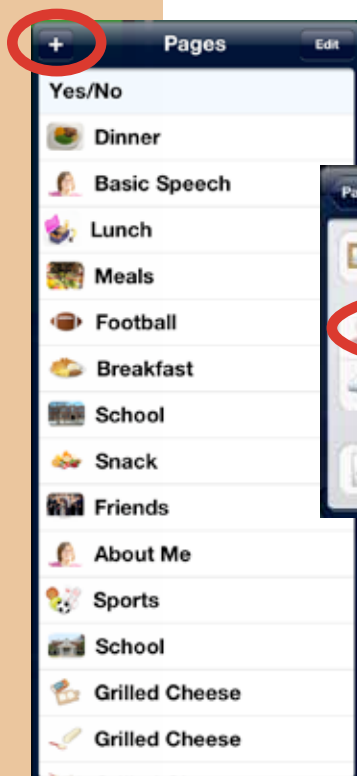


Zmáčkněte znaménko plus (+) a otevřete tak okno **Galerie šablon**. Pak stiskněte **Moje šablony** - zobrazí se dostupné šablony.

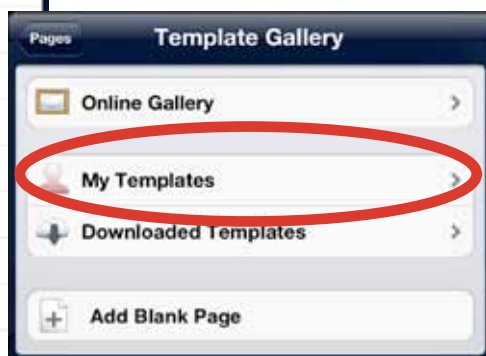

Stiskněte titulek nebo ikonu šablony, kterou chcete sdílet.



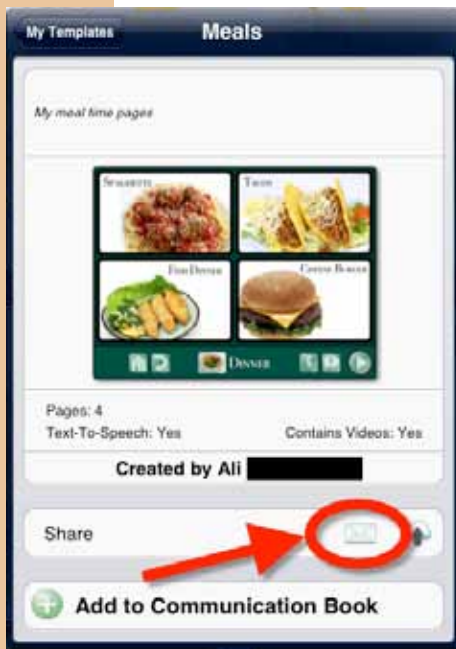

Stiskněte ikonu s obálkou na liště **Sdílet** a pošlete šablonu pomocí emailu.

Otevře se okno emailu s odkazem pro instalaci šablony.




Sdílení pomocí Online galerie šablon




Soukromá galerie

V nabídce Úprava stránek stiskněte tlačítko **Stránky** (umístěné vpravo od titulku stránky).

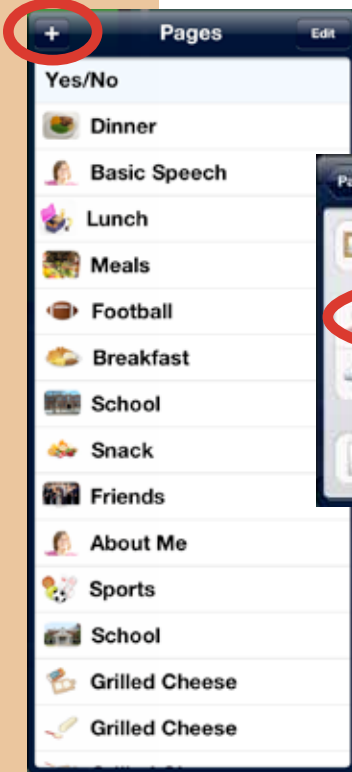


Zmáčkněte znaménko plus (+) a otevřete tak okno **Galerie šablon**. Pak stiskněte **Moje šablony** – zobrazí se dostupné šablony.

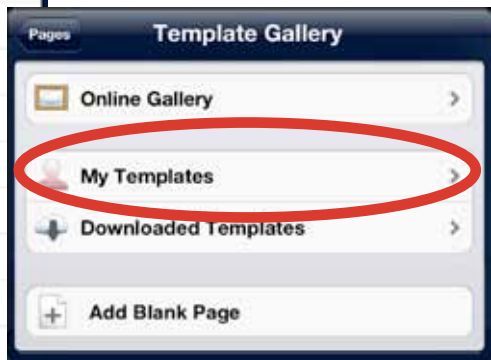


Stiskněte titulek nebo ikonu šablony, kterou chcete sdílet.



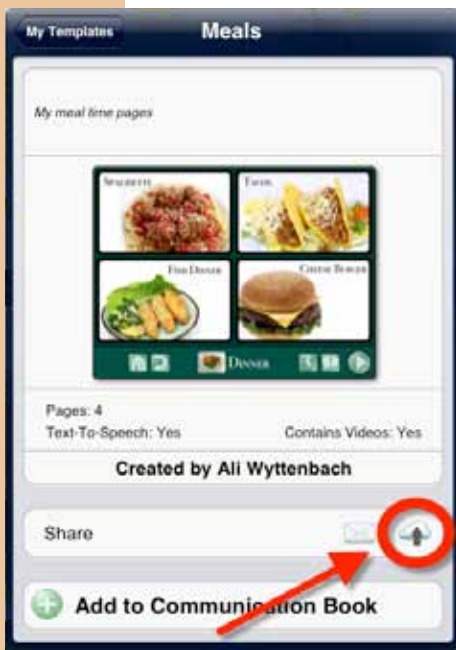


Stiskněte ikonu obláčku na liště **Sdílet**.

Otevře se okno **Nahrát do Online galerie šablon**. Pokud zvolíte možnost **Soukromá galerie**, budou moci vaši šablonu sdílet jen ti, kteří budou mít kód pro sdílení. Kód pro sdílení se vytvoří automaticky, ale můžete jej i změnit. Snažte se, aby kód byl jednoduchý k zapamatování, ale obtížný k uhodnutí.

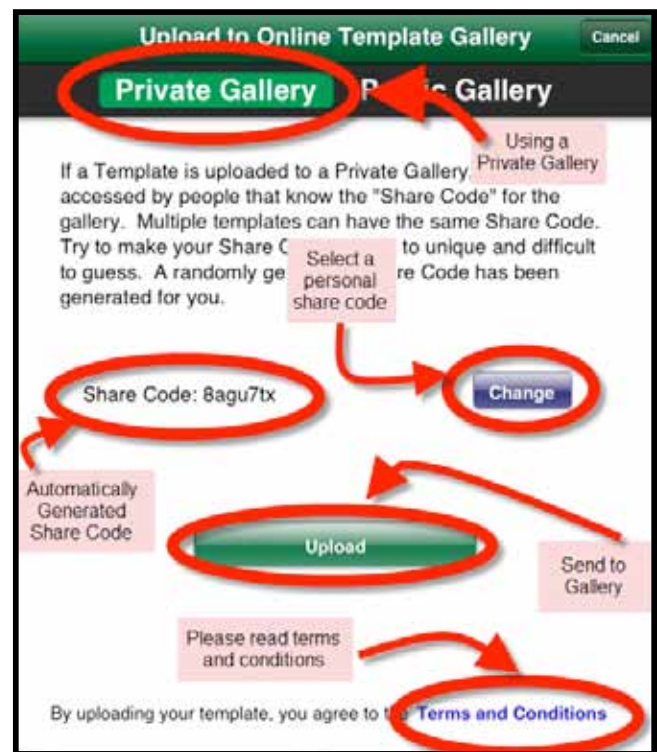

Věřejná galerie

V nabídce **Úprava stránek** stiskněte tlačítko **Stránky** (umístěné vpravo od titulku stránky).

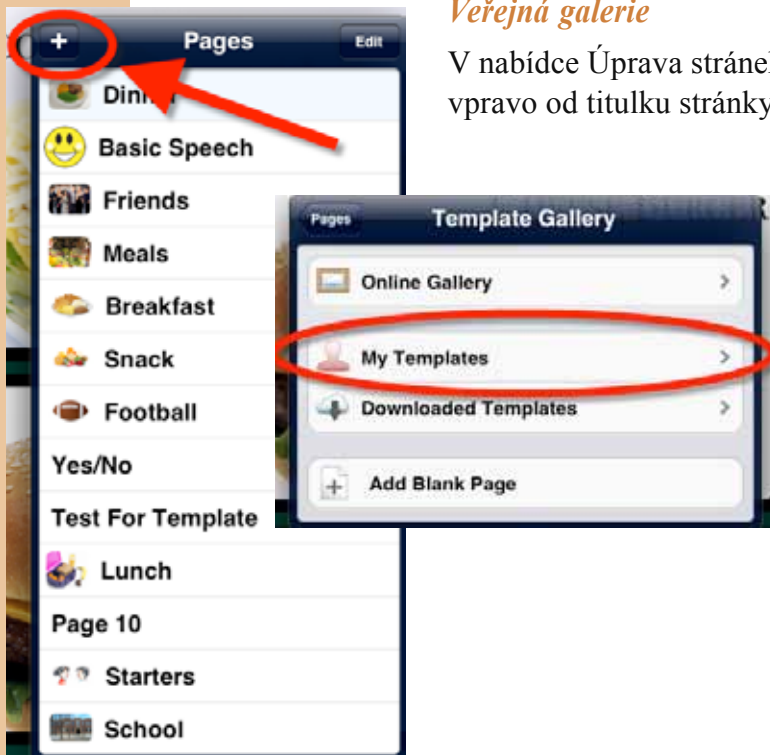


Zmáčkněte znaménko plus (+) a otevřete tak okno **Galerie šablon**. Pak stiskněte **Moje šablony** – zobrazí se dostupné šablony.

Stiskněte titulky nebo ikonu šablony, kterou chcete sdílet.





Stiskněte ikonu obláčku na liště **Sdílet**.

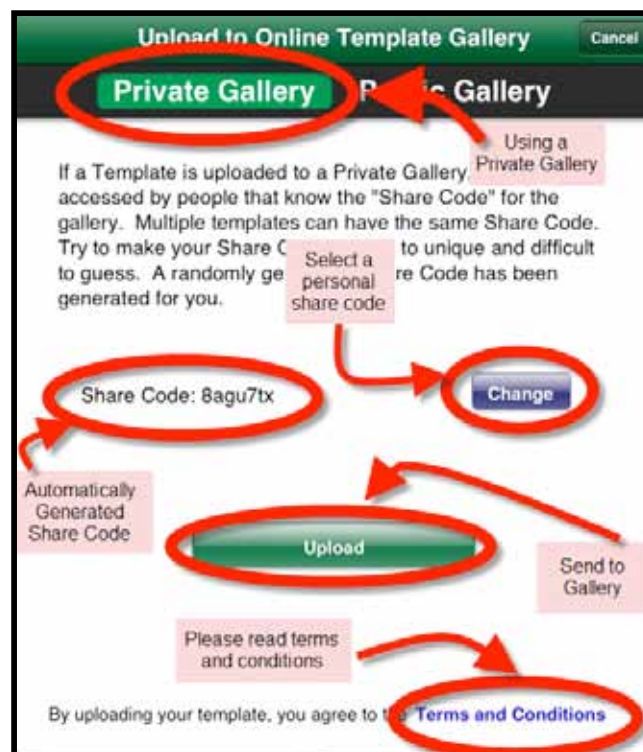


Šablonu nahranou do Veřejné galerie může stáhnout kdokoli, kdo užívá GoTalk NOW. Stiskněte tlačítko Změnit pro výběr kategorie, do které chcete přidat šablonu. Šablona může být přidána do více kategorií. Jako výchozí není nastavena žádná kategorie.

➔ **Poznámka:** Šablony přidávané do Veřejné galerie nelze smazat.

V horním pravém rohu se objeví jedna ze tří ikon, které označují šablony ve **Veřejné galerii**.



Žlutá hvězda znamená, že tato šablona je vytvořena společností Attainment Company, Inc.

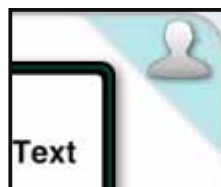

Silueta osoby znamená, že jde o jednu z vašich šablon.



Obláček s červeným pozadím znamená, že tato šablona byla stažena.



Poděkování

Projektový manažer

Don Bastian

Projektový programátor

Barrett Jacobsen

Kontrola kvality

Alison Wyttbach

Grafika

Heidi Barnhill

Beverly Potts

Vývojový tým

Julie Denu	Joni Nygard
Autumn Garza	Don Severson
Craig Booth	Scott Meister
Doug Graham	Don Bastian
Ali Wyttbach	Barrett Jacobsen

Portions of the code were contributed by the following:

LightMenuBar	Haoxiang Li
ABPadLockScreen	Aron Bury
Enormego Cocoa Helpers	Enormego
SBTableAlert	Simon Blommegård
InAppSettingsKit	Luc Vandal and Ortwin Gentz
CMPopTipView	Chris Miles
Asi-Http-Request	All-Seeing Interactive
SDWebImage	Olivier Poitrey
TouchJSON	Jonathan Wight
AQGridView	Jim Dovey
SVProgressHUD	Sam Vermette
UAModalPanel	Urban Apps

Kontaktujte nás

Uvítáme vaše otázky nebo komentáře.

Attainment Company, Inc.

P.O. Box 930160 • Verona WI 53593-0160 USA

email: gotalknow@AttainmentCompany.com

phone: 1-800-327-4269 or 608-845-7880

www.AttainmentCompany.com

Překlad: Jana Šarounová, SPC
pro vady řeči se zaměřením na AAK
www.alternativnikomunikace.cz