Postup překopírování upravených mřížek z programu Grid 2 do aplikace Grid Player na iPadu

Aplikace **Grid Player pro iPad (zdarma)** obsahuje komunikační mřížky, které však nejdou nijak v iPadu upravovat (tedy přidávat například fotografie, měnit nápisy, velikost písma apod). Pokud chcete takové úpravy dělat a do aplikace Grid Player v iPadu si změny "posílat", musíte mít zakoupený program Grid 2 pro počítač (Windows).

Program Grid 2 je možno vyzkoušet ve **zkušební verzi**, ke stažení je zde: <u>http://installers.sensorysoftware.com/</u>. V této zkušební verzi však nejde posílat změny do iPadu, můžete si jen vyzkoušet, jak se mřížky upravují.

Pokud jste **zakoupili program Grid 2**, upravené mřížky do iPadu je možno překopírovat. Potom použijte tento postup:

- 1. Otevřete program Grid 2 na počítači.
- 2. Upravte si daný soubor mřížek (jak se to dělá, je popsáno například v manuálu Grid 2-Krok za krokem).
- 3. Po skončení úprav otevřete okno Prohlížeče mřížek



- 4. Nahoře vidíte symbol pro Online mřížky a nápis Nepřihlášen.
- 5. Klikněte na toto tlačítko a přihlaste se **pod stejným emailem a heslem**, jímž jste se zaregistrovali do Online mřížky při stahování aplikace Grid Player do iPadu.

🖶 Online mřížky přihlásit		
Prosím přihlaste se do	svého účtu na stránkách Online mřížky.	
V	reci@ceapam.ca	
Emailová adresa:	recięseznam.cz	
Heslo:	okokokokokokokok	
F Přil	lásit automaticky	ABC Text Talker
	OK Storno	
Získat účet na Online mřížky		C D E F G A B
	facebook CZ po posledni verzi	Hrajeme na klavír

6. Pokud se přihlášení zdařilo a odklikli jste OK, objeví se Vám nahoře, pod jakým jménem jste přihlášeni.

P			
it Nápově	ĕda		
atel 🔝 Zobrazit 🦉 Přihlášen jako SPC			
6 bi	uněk se zvukovým skenováním ABC Text Talker		

7. Nyní klikněte na soubor mřížek (uživatele), které jste upravovali, zde například Karolínka a hned potom klikněte vlevo na liště na možnost Poslat do Grid Playeru.



- 8. Tabulky se "odešlou" a budou připraveny pro stáhnutí do iPadu.
- 9. Pak otevřete v **iPadu** aplikaci Grid Player. Na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko pro obnovení a upravená mřížka bude stažena do iPadu.

